

- Odontóloga y Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Profesora asociada del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Miembro de las sociedades SECIB, SEPA, FOR, ITI y FICO.
- Revisora en Journal of Clinical and Experimental Dentistry.
- Autora de diversas publicaciones científicas.
- Premio SECIB 2016 al mejor artículo publicado en revistas de impacto extranjeras.



REGENERACIÓN ÓSEA Y PRESERVACIÓN ALVEOLAR CON ICEBERG-OSS


“Quiero ponerme los dientes que me faltan”

- Antecedentes:

- EME
- Edad: 31 años
- Alergias: No refiere
- No antecedentes médicos
- Fumadora 7-8 cigarrillos al día

- Diagnóstico:




- Edentulismo parcial
- Resto radicular de 25

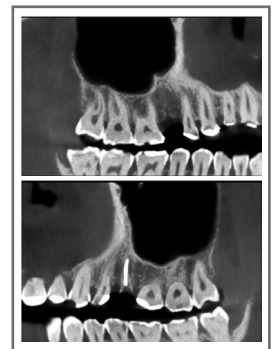

- Plan de tratamiento:

- Exodoncia de 25 y preservación alveolar con: **Iceberg-oss®** 0,5gr y membrana de colágeno **Resodent F®** 32 x 25mm.


- Implante osteointegrado y prótesis sobre implantes en posición 25.

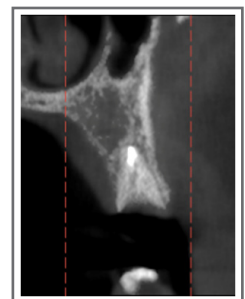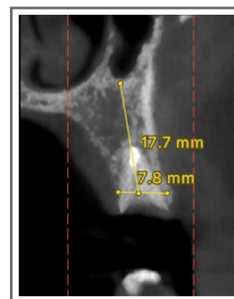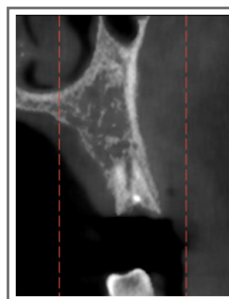

25

- Implante osteointegrado Avantgard (3,75 x 10mm) en posición 15 y regeneración ósea simultánea en vestibular con: **Iceberg-oss®** 0,5gr y membrana de colágeno **Resodent F®**.

- Prótesis sobre implantes en posición 15.

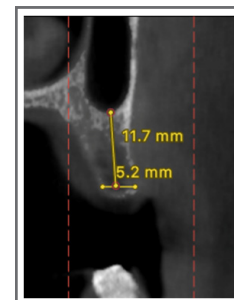

15

REGENERACIÓN ÓSEA Y PRESERVACIÓN ALVEOLAR CON ICEBERG-OSS




Imagen preoperatoria




Tunelización tras la exodoncia de 25



Medición del alveolo post-extracción

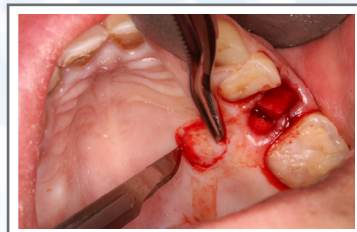


Toma de un injerto epitelial libre (Punch) en palatino

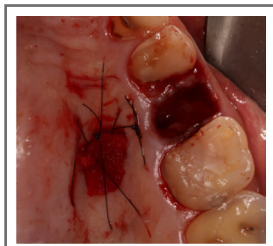


Colocación y sutura de una esponja de colágeno en la zona donante




Iceberg-Oss® 0,5gr partícula 0,2-1mm

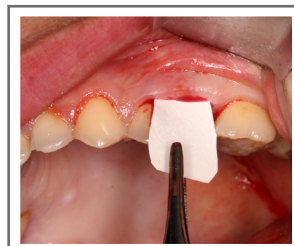


Colocación de membrana **Resodent F®** en vestibular del alveolo post-extracción

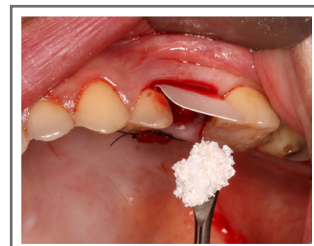


Colocación de xenoinjerto **Iceberg-Oss®** en el alveolo post-extracción.

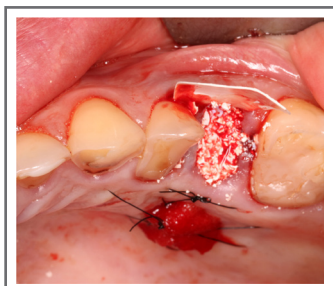

Colocación de xenoinjerto **Iceberg-Oss®** en el alveolo post-extracción

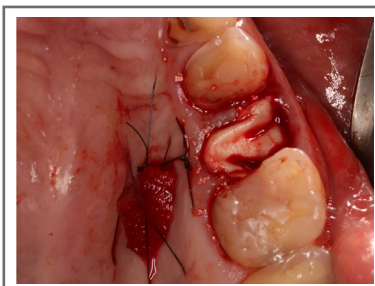

Adaptación de la membrana **Resodent F®**

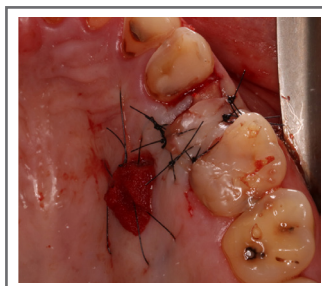

Colocación del injerto epitelial libre (Punch)




Incisión crestal con descarga mesial y distal en posición de 15



Elevación del colgajo mucoperióstico trapezoidal




Colocación de un implante **gmi avantgard®** (3,75 x 10mm) en posición de 15

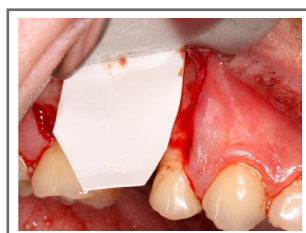


Adaptación de la membrana de colágeno **Resodent F®**



Colocación de xenoinjerto **Iceberg-Oss®**

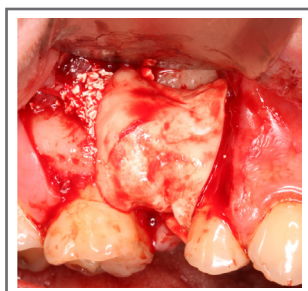

Adaptación de la membrana **Resodent F®**

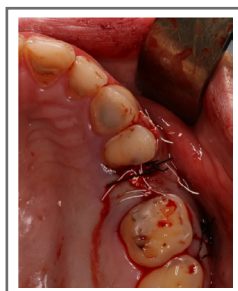

Sutura

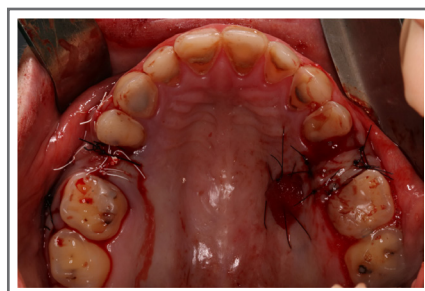


Imagen postoperatoria