



- Odontóloga y Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Profesora asociada del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Miembro de las sociedades SECIB, SEPA, FOR, ITI y FICO.
- Revisora en Journal of Clinical and Experimental Dentistry.
- Autora de diversas publicaciones científicas.
- Premio SECIB 2016 al mejor artículo publicado en revistas de impacto extranjeras.



REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON ICEBERG-OSS

“Quiero ponerme los dientes que me faltan”

- Antecedentes:

- CN
- Edad: 58 años
- Alergias: Clorhexidina
- No antecedentes médicos
- No hábitos tóxicos

- Diagnóstico:

- Edentulismo parcial




- Plan de tratamiento:

- Implante osteointegrado **gmi avantgard®** (3,75 x 10 mm) en posición 24.

- Regeneración ósea guiada simultánea en vestibular con:

Iceberg-oss® 0,5gr y membrana de colágeno **Resodent F®** 32 x 25mm.

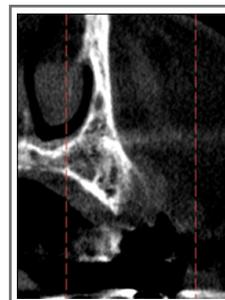


- Prótesis sobre implantes en posición 24.

REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON ICEBERG-OSS



Imagen preoperatoria

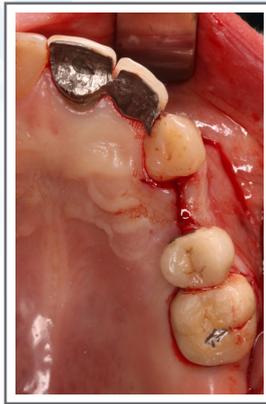

Incisión crestal con descarga mesial



Elevación del colgajo mucoperiosteico




Elevación del colgajo mucoperiosteico



Fresado para la colocación de un implante **gmi avantgard®** en posición 24



Fresado para la colocación de un implante **gmi avantgard®** en posición 24

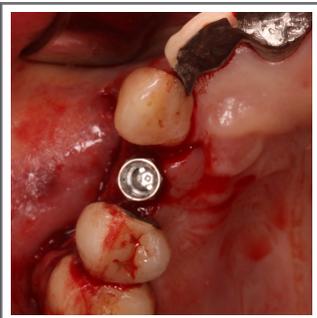

Fresado para la colocación de un implante **gmi avantgard®** en posición 24




Iceberg-oss® 0,5gr partícula 0,2 - 1mm



Adaptación de la membrana de colágeno **Resodent F®**



Relleno con **Iceberg-oss®** 0,5gr partícula 0,2 - 1mm

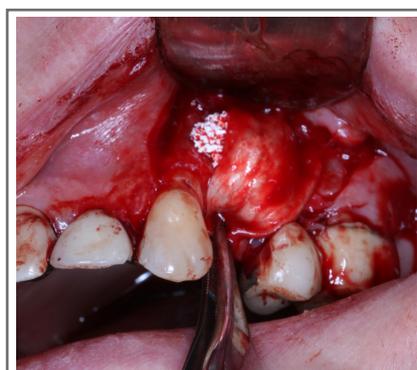

Adaptación de la membrana de colágeno **Resodent F®**



Sutura