

- Odontóloga y Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Profesora asociada del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Miembro de las sociedades SECIB, SEPA, FOR, ITI y FICO.
- Revisora en Journal of Clinical and Experimental Dentistry.
- Autora de diversas publicaciones científicas.
- Premio SECIB 2016 al mejor artículo publicado en revistas de impacto extranjeras.



REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON ICEBERG-OSS


“Quiero ponerme los dientes que me faltan”

- Antecedentes:

- NLR
- Edad: 56 años
- Alergias: No
- No antecedentes médicos
- No hábitos tóxicos

- Diagnóstico:

- Edentulismo parcial

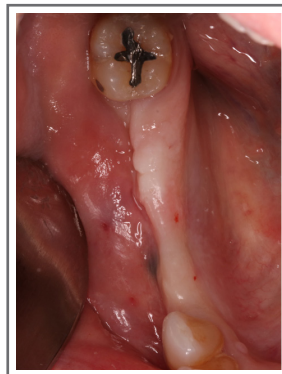


- Plan de tratamiento:

- Regeneración ósea guiada en 44 y 47 con:

Iceberg-oss® 0,5gr y membrana de colágeno **Resodont F®** 25 x 32mm.


- Implantes osteointegrados **gmi avantgard®** en posición 44 (3,75 x 10mm) y 46 (4,25 x 8mm).

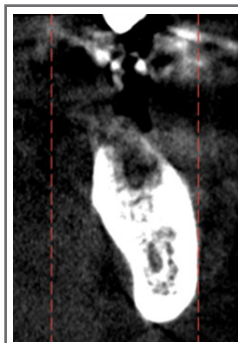

47



46

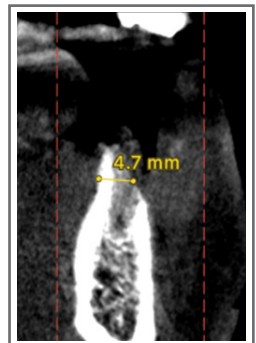

44

- Prótesis sobre implantes en posición 44, 45 y 46.

REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA CON ICEBERG-OSS



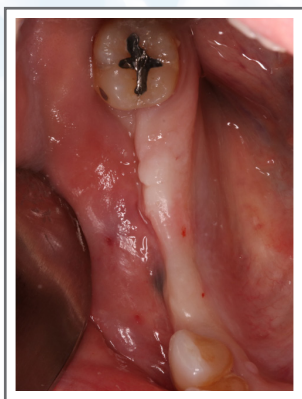



Imagen preoperatoria

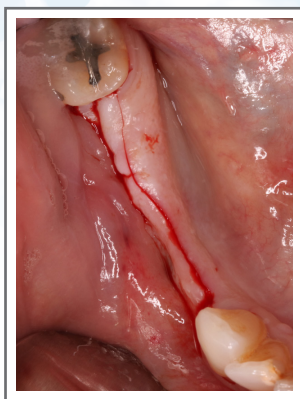

Incisión crestal con
descarga mesial

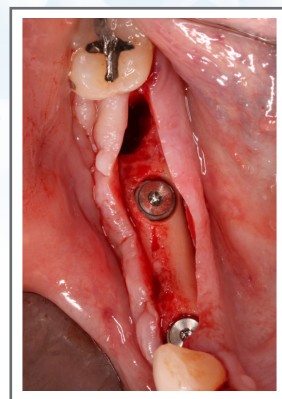


Colocación de implantes
gmi avantgard® en posición
44 y 46

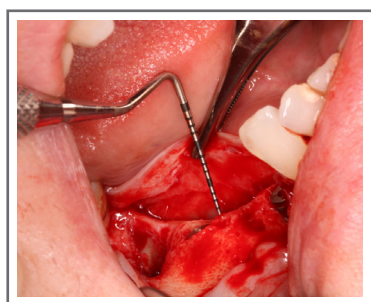


Maniobra de Rerhman lingual
y vestibular




Iceberg-oss® 0,5gr partícula 0,2 - 1mm

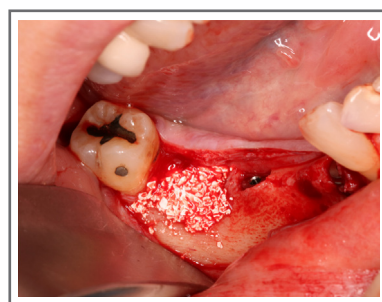


Colocación de xenoinjerto **Iceberg-oss®**
en posición 47

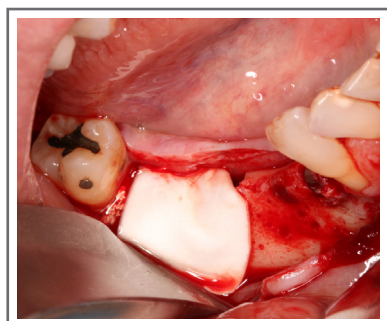


Adaptación de membrana **Resodent F®**
en posición 47

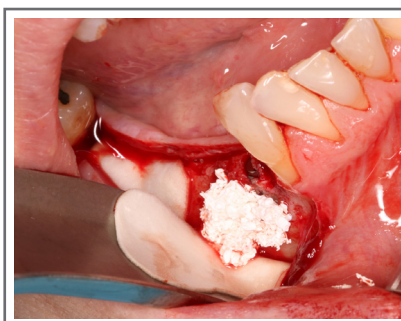


Colocación de xenoinjerto **Iceberg-oss®** y
adaptación de membrana **Resodent F®**
en posición 44

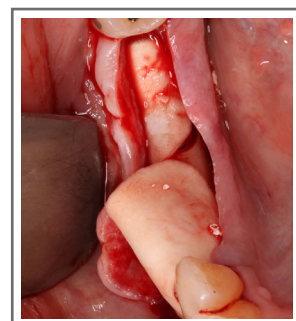

Adaptación de membrana
Resodent F®

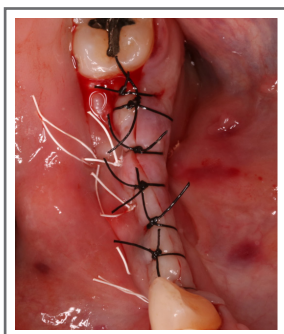

Sutura

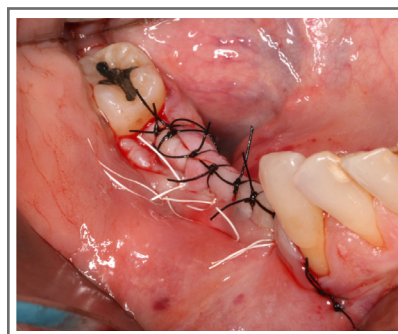

Sutura