


- Odontóloga y Máster en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Profesora asociada del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial UB.
- Miembro de las sociedades SECIB, SEPA, FOR, ITI y FICO.
- Revisora en Journal of Clinical and Experimental Dentistry.
- Autora de diversas publicaciones científicas.
- Premio SECIB 2016 al mejor artículo publicado en revistas de impacto extranjeras.

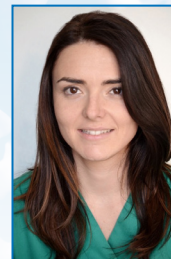

ELEVACIÓN DE SENO CON ICEBERG-OSS

“Quiero ponerme los dientes que me faltan”

- Antecedentes:

- FMD
- Antecedentes odontológicos
- Edad: 57 años
- Alergias: Diclofenaco
- No antecedentes médicos
- No hábitos tóxicos

- Diagnóstico:

- Edentulismo parcial




- Plan de tratamiento:

- Elevación de seno con ventana lateral izquierda.


Iceberg-oss® 0,5gr y membrana de colágeno **Iceberg®**.

- Implantes osteointegrados en posición 25 y 27.


- Prótesis sobre implantes en posición 25, 26 y 27.

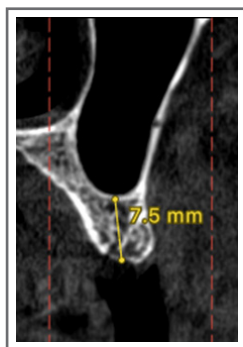

25

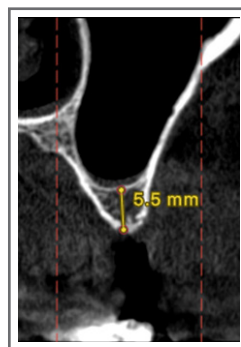

26

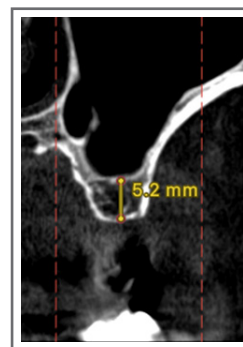


27


ELEVACIÓN DE SENO CON ICEBERG-OSS




Imágenes preoperatorias

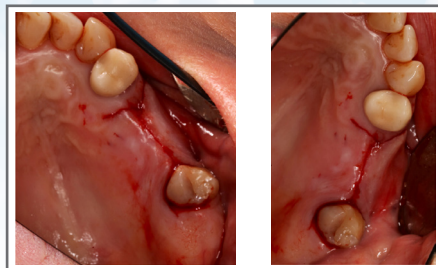

Incisión crestral con descarga mesial

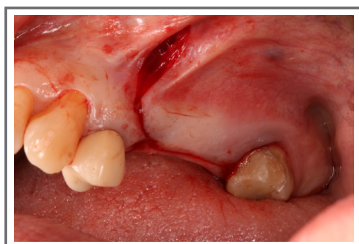


Incisión crestral con descarga mesial

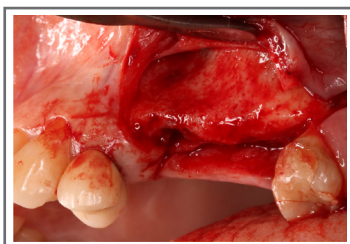


Elevación del colgajo mucoperiostico



Ventana en la pared lateral sinusal con fresa de carburo de tungsteno del nº 8

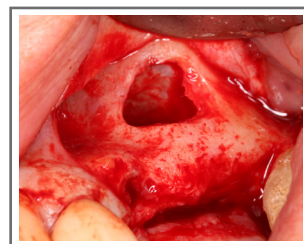


Elevación de la membrana sinusal con curetas

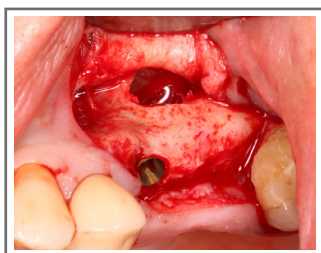


Colocación del implante en posición 25




Iceberg-oss® 0,5gr
partícula 0,2 - 1mm

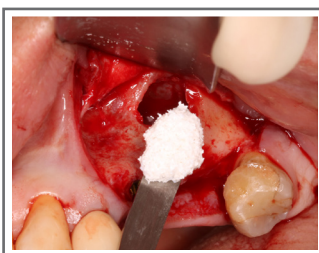

Relleno con **Iceberg-oss®** 0,5gr
partícula 0,2 - 1mm

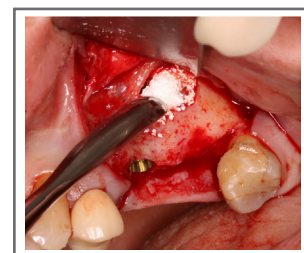


Relleno con **Iceberg-oss®** 0,5gr
partícula 0,2 - 1mm

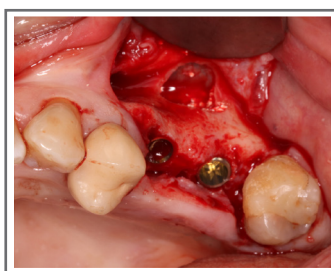


Colocación del implante en posición 27




Relleno con **Iceberg-oss®**
y colocación de pilares de cicatrización

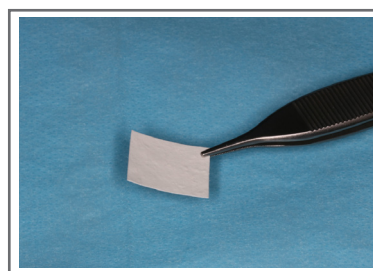


Membrana de colágeno **Iceberg®**

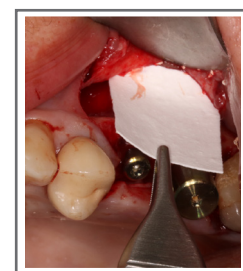


Adaptación de la membrana de colágeno **Iceberg®**

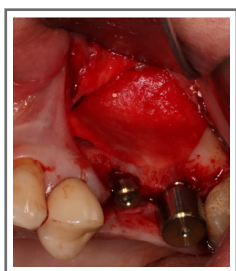

Adaptación de la membrana de colágeno **Iceberg®**

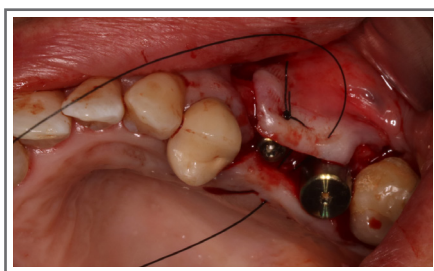

Sutura

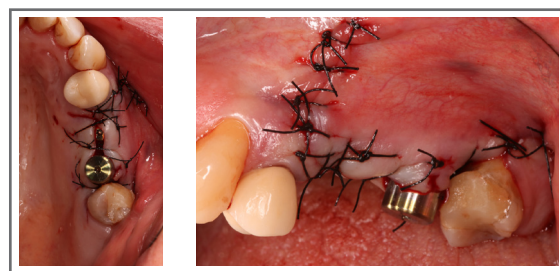

Imágenes postoperatorias